

ПАМЯТКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

«Стол для санитарной обработки новорождённых «АИСТ-2»

Перед началом использования изделия внимательно изучите Паспорт изделия.

Соблюдайте следующий порядок работы:

1. Проверьте, что все колёса Стола поставлены на тормоз.
2. Включите питание Блока управления выключателем на передней панели.
3. При необходимости включите освещение кнопкой, расположенной слева от выключателя. При этом загорится светодиодный индикатор **«ОСВЕЩЕНИЕ ВКЛЮЧЕНО»**.
4. Положите датчик температуры на середину матраца. Верхний индикатор температуры будет показывать температуру датчика, нижний индикатор температуры будет показывать заданную температуру.
5. Кнопками **«БОЛЬШЕ»/«МЕНЬШЕ»** задайте температуру обогрева ложа.
6. Кнопкой **«ВКЛ/ВЫКЛ»** включите нагрев. При этом загорится светодиодный индикатор **«НАГРЕВ ВКЛЮЧЕН»**.
7. Через 10-30 минут Стол будет готов к работе. Время выхода на заданный режим зависит от заданной температуры и от температуры воздуха в помещении. О готовности свидетельствует мигание индикатора **«НАГРЕВ»**.
8. Положите ребёнка на матрац ложа, датчик температуры закрепите на теле ребёнка (например, лейкопластырем) за провод. Датчик должен прикасаться к телу ребёнка металлической частью.

ВНИМАНИЕ!



Следите, чтобы датчик температуры Стола находился под воздействием прямого инфракрасного излучения, не закрывался простынями и другими принадлежностями.
В противном случае может произойти перегрев ребёнка.

9. По окончании работы выключите нагрев кнопкой **«ВКЛ/ВЫКЛ»**, затем отключите питание Блока управления выключателем.
При санитарной обработке и длительном перерыве в работе выньте вилку сетевого шнура из розетки.
В процессе работы Блок управления проводит диагностику устройств для обеспечения безопасности пациентов. Контролируются следующие параметры:
- исправность датчика температуры;
 - перегрев ложа (повышение температуры до +40°C);
 - отклонение температуры ложа (датчика) в рабочем режиме больше, чем на 1°C от заданной;
 - время выхода на режим;
 - пропадание напряжения в электрической сети;
 - разряд батарей аварийной сигнализации.

В процессе эксплуатации при обнаружении неисправности загорается индикатор **«АВАРИЯ»**, включается звуковой сигнал. В этом случае уберите ребёнка с ложа. Отключите звуковой сигнал нажатием кнопок **«БОЛЬШЕ»/«МЕНЬШЕ»**. Устраните причину неисправности. Если причина аварии не устранена в течение 15 минут, звуковой сигнал включится снова. После устранения неисправности нажмите кнопку **«ВКЛ/ВЫКЛ»**. Для продолжения работы смотрите пункт 5 настоящей Памятки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!



- запрещается подключать Стол к двухполюсной розетке без защитного заземления;
- запрещается оставлять ребёнка на ложе после проведения процедур при включенном нагревательном устройстве;
- запрещается передвигать Стол с размещённым на нём ребёнком, а также при включённой в сеть вилке шнура питания;
- запрещается оставлять без присмотра включенный в сеть Стол.